

idi

Image Diagnostics, Inc.

Hersteller von hochwertigen medizinischen Produkten

Aspect 100-4T G3 und ISR G3

Mobile Bildgebungstische



Anweisungen zum Auspacken

Hergestellt in den USA


Benötigte Werkzeuge zum Auspacken von G3-Tischen:

- ✓ RATSCHENSCHLÜSSEL.
- ✓ 9/16 " INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR RATSCHENSCHLÜSSEL.
- ✓ #2 KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENZIEHER ODER BOHRER MIT BOHRSPITZE.
- ✓ SCHRÄGSCHNEIDER.

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn dieser Tisch als Demonstrationsmodell oder auf einer Messe verwendet wird, MÜSSEN alle Versandmaterialien AUFBEWAHRT WERDEN, damit der Tisch ordnungsgemäß umgepackt werden kann. Siehe IDI-Arbeitsanweisung MWI-0101, um den Tisch neu zu packen.

Anweisungen zum Auspacken von G3-Tischen:

1. Inspizieren Sie den Karton, in den der Tisch gepackt wurde, und die Kippkufe, auf der er steht, visuell auf Schäden. Der "Nicht stapeln"-Kegel, wie in der Abbildung rechts gezeigt, sollte vorhanden und intakt sein.

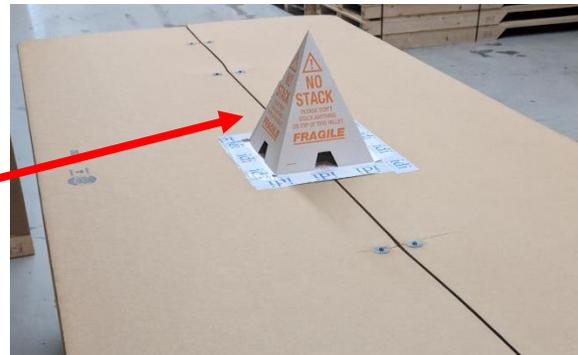

2. Mit der Kippkufe auf einer harten, glatten und ebenen Fläche; Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher # 2 oder Bohrer, um alleschwarzen Schrauben um die Basis des Pappkartons zu entfernen, wie in der



Abbildung rechts gezeigt. Heben Sie den Karton gerade hoch und von der Kippkufe über den Tisch.

3. Überprüfen Sie die beiden Shockwatch™-Schock-Anzeigeräte auf Anzeichen eines schweren Schocks. Wenn das Fläschchen in der Mitte des Indikators rot geworden ist, wie in der Abbildung rechts gezeigt, hat die Kiste während des Transports hohe Stoßkräfte erfahren. Wenden Sie sich sofort an IDI, um weitere Anweisungen zu erhalten, wenn eines dieser Geräte aktiviert wurde.



4. Entfernen Sie den Karton-Tischplattenschutz, wie im Bild rechts gezeigt.

5. Verwenden Sie eine Seitenschneider zum Schneiden der Umreifung wie im Bild rechts gezeigt. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden, da die Spannung gelöst wird. Entfernen Sie alle Kartons, die Tischsteuergeräten und Zubehör enthalten.



6. Entfernen Sie mit einem Ratschenschlüssel mit einem 9/16 " Innensechskantschlüssel zwei 3/8 " Schrauben vom Ende der Kippkufe, wie im Bild oben gezeigt.


7. Entfernen Sie die obere hölzerne Klampe und die untere Schiene an der Kippkufe wie unten gezeigt.



KLAMPE

SCHIENE

8. Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher # 2 oder Bohrer, um alle Deckschrauben zu entfernen, die die beiden Stahlhaltewinkel wie in der Abbildung rechts sichern.

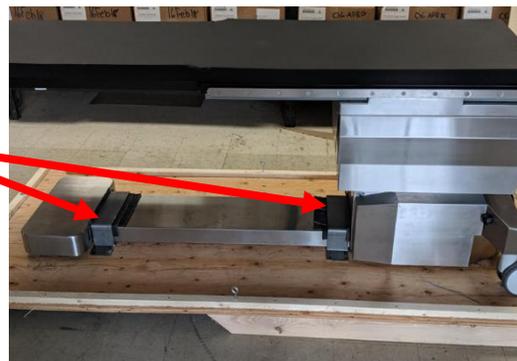




VORSICHT

Wenn sich der Tisch der Kante der Kippkufe nähert, werden die Kufe und der Tisch sich neigen, um den Tisch abrollen zu lassen.

9. Stellen Sie sicher, dass sich das Rollensperrpedal in der LENKEN-Position befindet, wie in der Abbildung rechts gezeigt. Der Tisch kann jetzt vorsichtig von der Kippkufe zum Ende der Kufe gerollt werden, wo die Klampe und die Schiene gerade entfernt wurden. Es ist hilfreich, diesem Ende der Kippkufe Gewicht hinzuzufügen, um das Abrollen des Tisches zu erleichtern.

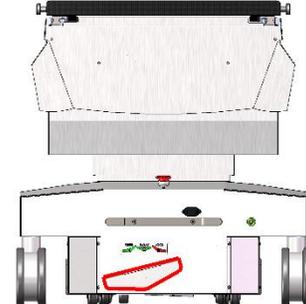

10. Wenn der Tisch als Lieferung an einen Kunden an seinen endgültigen Bestimmungsort geliefert wurde, sollten die Versandmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Alle Versandmaterialien, einschließlich Holzprodukte, entsprechen den Exportbestimmungen.

KUNDENDIENST

Verwenden Sie für technische Unterstützung die Kontaktinformationen unten. Haben Sie für die Kontaktaufnahme die vollständige Modell- und Seriennummer zur Hand, die sich auf dem Datenschild auf dem Tischfuß befinden.



Image Diagnostics, Inc.
310 Authority Drive
Fitchburg, MA 01420 USA



Oder wenden Sie sich telefonisch an IDI unter +1 (978) 829-0009 oder gebührenfrei in Amerika unter +1 (877) 304-5434.
Die Faxnummer für IDI ist +1 (978) 829-0027.