

idi

Image Diagnostics, Inc.

ilex

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

Outils suggérés :

- Ensemble de clés à cliquet avec douille de 9/16 po.
- Couteau à lame pivotante, cutter ou l'équivalent.

Step 1. Localisez et positionnez le patin sur une surface plane où il y a au moins 9 pieds d'espace libre pour permettre à la rampe de déchargement de s'abaisser et au chariot Ilex d'être déchargé.

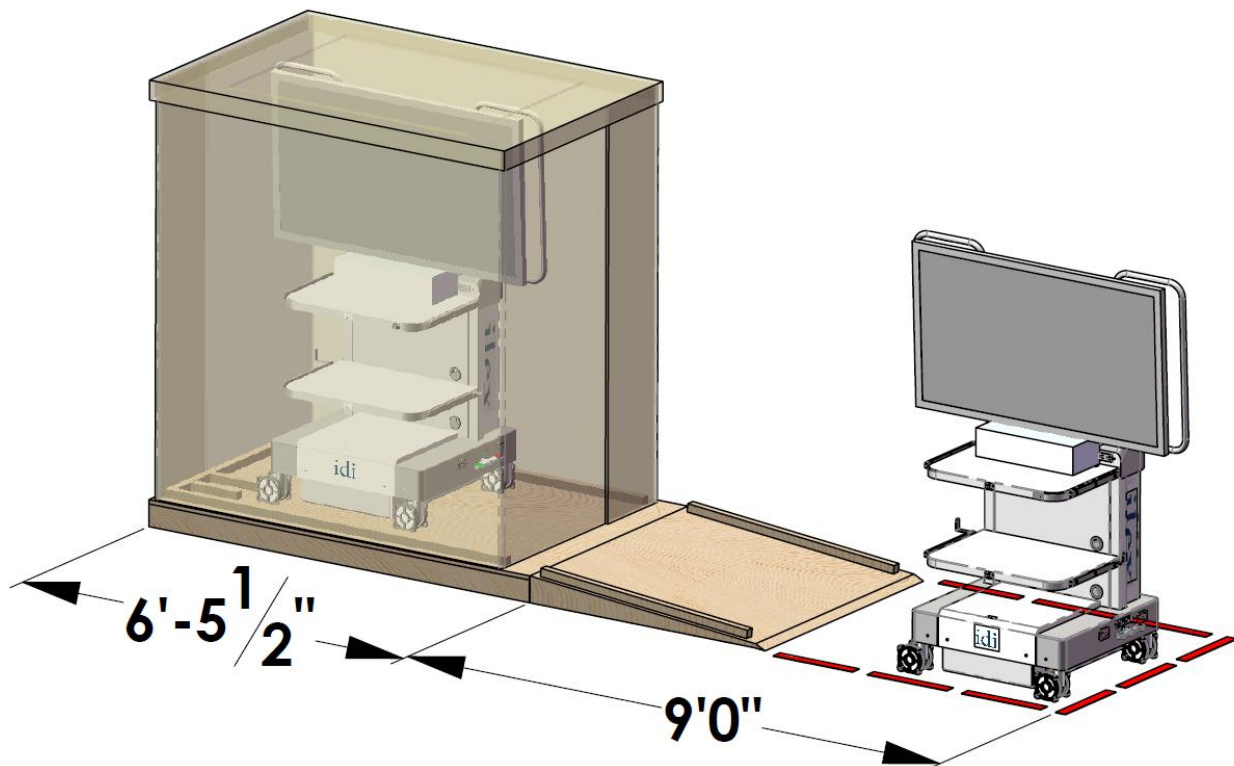




Image Diagnostics, Inc.

Step 2. Inspectez le carton d'expédition et la palette pour voir s'il n'y a pas de dommages externes.

Step 3. À l'aide de l'outil de coupe, enlevez les sangles du carton d'expédition. À ce stade, la rampe de glissement est en position libre, de sorte qu'elle doit être maintenue en place à la main jusqu'à ce qu'elle soit prête à être abaissée.

Step 4. Abaissez lentement la rampe de glissement sur une surface plane.

Step 5. Retirez la partie supérieure du carton d'expédition, ce qui permettra aux côtés de tomber du chariot Ilex.





Image Diagnostics, Inc.

- Step 6. Retirez tout le plastique transparent qui recouvre le chariot Ilex et les sangles qui maintiennent le support du moniteur et la boîte de l'ensemble de câbles en place.




- Step 7. Inspectez le chariot et ses accessoires pour déceler tout dommage apparent ou structurel. Si des dommages sont découverts, prenez des photos, notez-les sur les documents d'expédition et avisez immédiatement le service à la clientèle d'IDI au (978) 829-0009 ou sans frais au (877) 304-5434.

- Step 8. À l'aide d'une clé à cliquet avec une douille de 9/16 po., retirez les 8 boulons fixant l'Ilex au patin (4 par côté). Retirez les supports métalliques et jetez-les.



- Step 9. En utilisant votre pied, mettez le chariot dans la position « verrouillage de la direction » en appuyant sur la pédale de la roulette jusqu'à ce que le côté vert soit dans la position la plus basse.

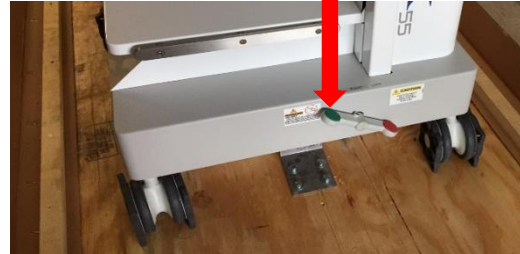

- Step 10. Faites rouler lentement le chariot Ilex hors du patin et faites descendre la rampe jusqu'à ce qu'il soit complètement hors du patin.



MISE EN GARDE

Utilisez toujours au moins deux personnes lors du transport de l'Ilex pour faciliter la manœuvrabilité et la visibilité. Le déplacement de l'Ilex sur des surfaces inégales ou inclinées exige une attention particulière.

- Step 11. Une fois le système déplacé à l'emplacement souhaité, relâchez l'arrêt d'urgence de la colonne en tournant le bouton rouge d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Step 12. Soulevez le moniteur en appuyant sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit suffisamment haut pour retirer le bloc de mousse qui le supporte
- Step 13. Enlevez et éliminez tout le matériel d'expédition selon les exigences du client.

