

# Aspect 100RTL – FICHE RAPIDE



**AVERTISSEMENT! Lire le mode d'emploi avant utilisation**

## MISE EN PLACE ET PRÉPARATION DU PATIENT :

Pour déplacer la table :

- 1) Déverrouiller les roulettes avant et arrière.
- 2) Placer la table à l'emplacement souhaité.
- 3) Sécuriser la table en verrouillant les roulettes avant et arrière.

Alimentation CA :

- 1) Brancher le câble d'alimentation dans la prise correctement mise à la terre.
- 2) Protéger le câble d'alimentation des roulettes et de tout autre équipement.

Commandes :

- 1) Lorsqu'il est engagé, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence désactive toutes les commandes de mouvement du plateau de table.
- 2) Vérifier que les commandes manuelles et à pédale sont connectées à la table.
- 3) Si les commandes de mouvement du plateau de table ne fonctionnent pas, vérifier que le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence n'est PAS enfoncé.
- 4) Actionner les commandes pour vérifier que l'alimentation électrique est présente et que le mouvement de la table fonctionne correctement.

## PROCÉDURES D'URGENCE :

Pour arrêter le mouvement du plateau de table :

- Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé.


Panne de l'alimentation CA :

- La batterie interne permet le fonctionnement des mouvements du plateau de table. Ramener le plateau de table en position adéquate afin de permettre le retrait sécuritaire du patient.



## RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR) :

Ramener la table à niveau, centrer le plateau pour minimiser le surplomb et abaisser la table à une hauteur confortable avant d'effectuer la RCR.

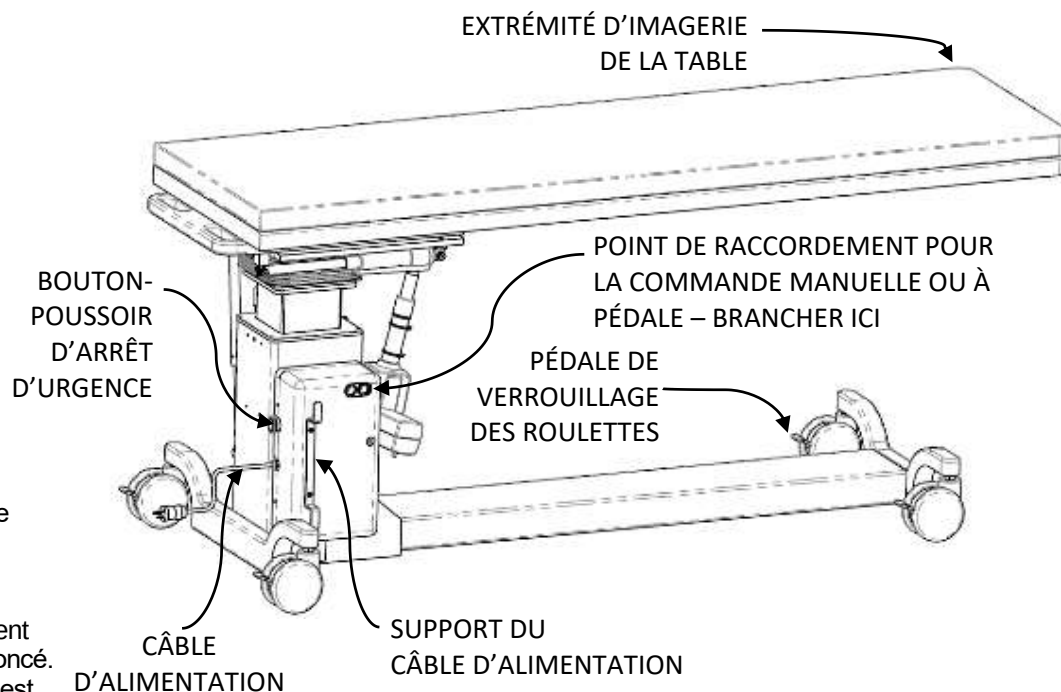

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE :


- 1) Débrancher le câble d'alimentation et l'enrouler autour du support de câble.
- 2) Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- 3) Mettre les pédales de verrouillage des roulettes en position VERROUILLAGE.
- 4) Nettoyer et désinfecter la table.



Numériser pour accéder aux manuels d'utilisation en ligne

# Aspect 100RTL – FICHE RAPIDE

## COMMANDE MANUELLE

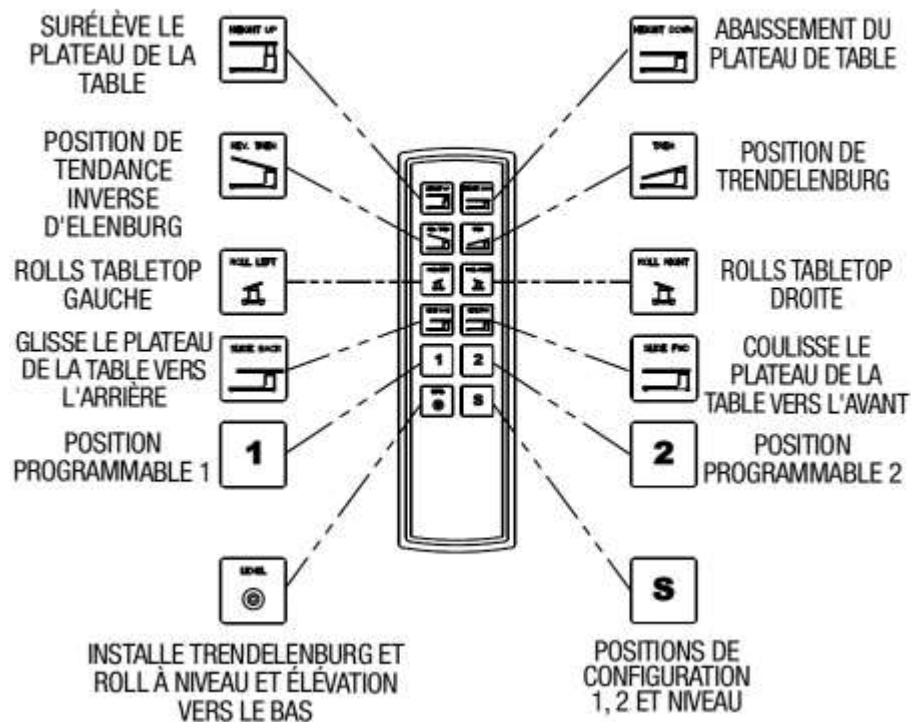


**BOUTON-POUSOIR  
D'ARRÊT  
D'URGENCE**



- ENFONCER le bouton pour arrêter **TOUT** mouvement du plateau de table.
- TOURNER pour réinitialiser.

## PÉDALE DE COMMANDE

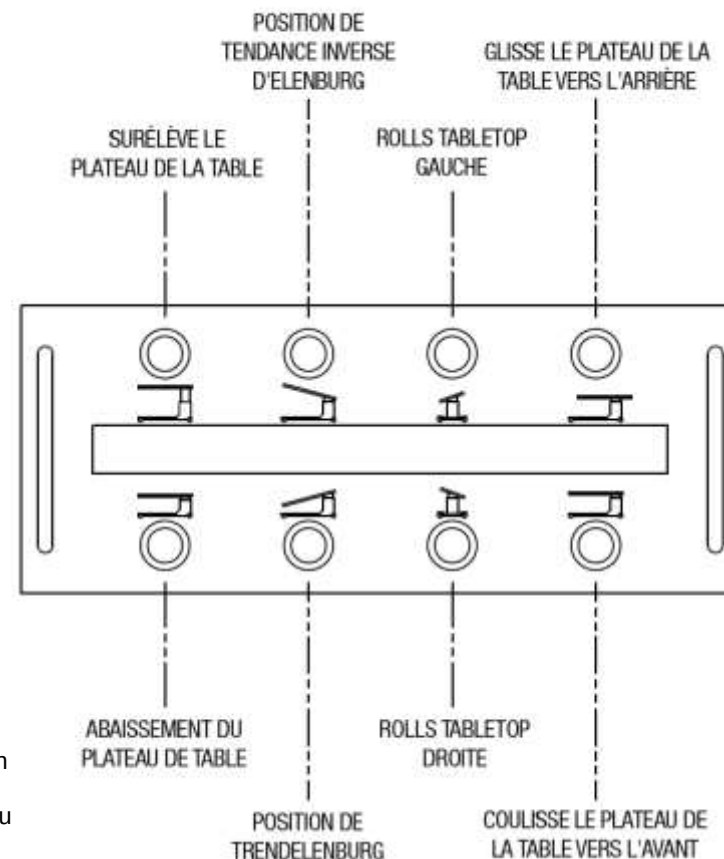

Les patients doivent être installés sur la table par le côté. Une inclinaison ou une instabilité peut survenir si le patient est installé à l'extrémité d'imagerie de la table.