

100RT – FICHE RAPIDE



AVERTISSEMENT! Lire le mode d'emploi avant utilisation

MISE EN PLACE ET PRÉPARATION DU PATIENT :

Pour déplacer la table :

- 1) Déverrouiller les roulettes avant et arrière.
- 2) Placer la table à l'emplacement souhaité.
- 3) Sécuriser la table en verrouillant les roulettes avant et arrière.

Alimentation CA :

- 1) Brancher le câble d'alimentation dans la prise correctement mise à la terre.
- 2) Protéger le câble d'alimentation des roulettes et de tout autre équipement.

Commandes :

- 1) Lorsqu'il est engagé, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence désactive toutes les commandes de mouvement du plateau de table.
- 2) Vérifier que les commandes manuelles et à pédale sont connectées à la table.
- 3) Si les commandes de mouvement du plateau de table ne fonctionnent pas, vérifier que le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence n'est PAS enfoncé.
- 4) Actionner les commandes pour vérifier que l'alimentation électrique est présente et que le mouvement de la table fonctionne correctement.

PROCÉDURES D'URGENCE :

Pour arrêter le mouvement du plateau de table :

- Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé.

Panne de l'alimentation CA :


- La batterie interne permet le fonctionnement des mouvements du plateau de table. Ramener le plateau de table en position adéquate afin de permettre le retrait sécuritaire du patient.

BOUTON
D'ARRÊT
D'URGENCE

LES COMMANDES À LA MAIN ET
AU PIED SE BRANCHENT ICI

PÉDALE DE
VERROUILLAGE
DES ROULETTES

CÂBLE D'ALIMENTATION

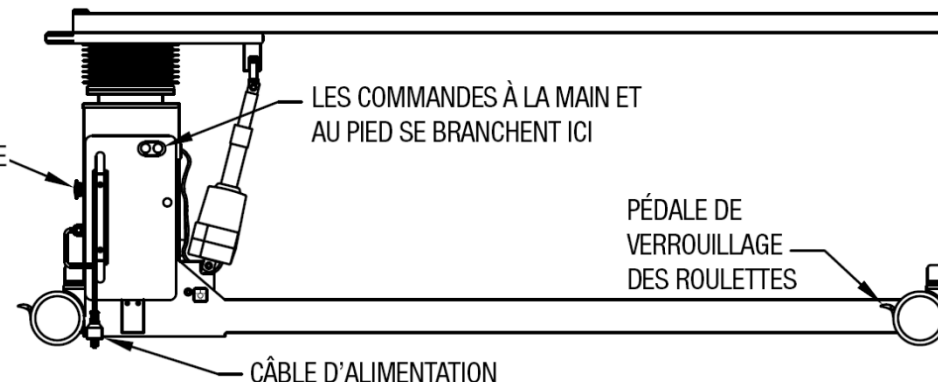

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE :

- 1) Débrancher le câble d'alimentation et l'enrouler autour du support de câble.
- 2) Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- 3) Mettre les pédales de verrouillage des roulettes en position VERROUILLAGE.
- 4) Nettoyer et désinfecter la table.



Numériser
pour
accéder
aux
manuels
d'utilisation
en ligne




RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR) :


Ramener la table à niveau, centrer le plateau pour minimiser le surplomb et abaisser la table à une hauteur confortable avant d'effectuer la RCR.

100RT – FICHE RAPIDE

COMMANDE MANUELLE

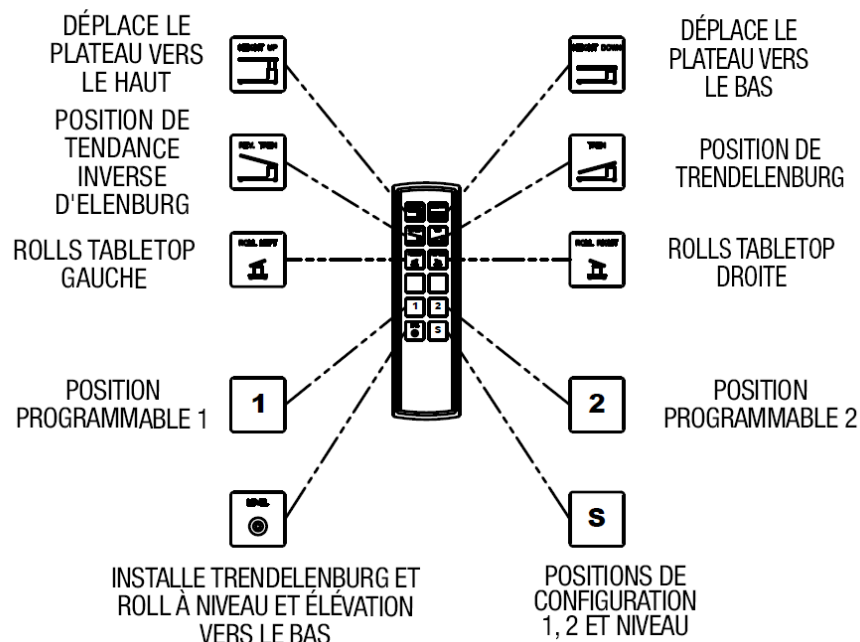

PÉDALE DE COMMANDE

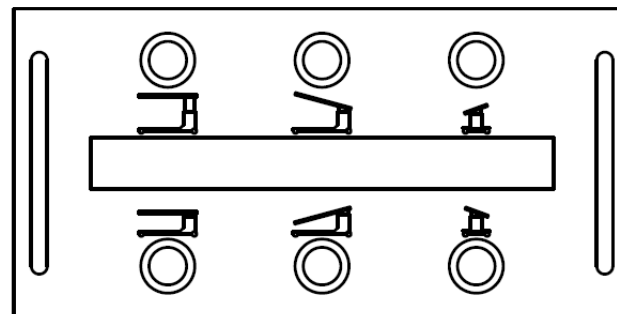

La paire de commandes de gauche actionne le plateau de table de haut en bas. La paire de commandes du milieu actionne le mouvement de Trendelenburg. La paire de commandes de droite actionne le plateau de table à gauche et à droite.

**BOUTON-POUSOIR
D'ARRÊT
D'URGENCE**



- ENFONCER le bouton pour arrêter **TOUT** mouvement du plateau de table.
- TOURNER pour réinitialiser.

COMMENT PROGRAMMER LES BOUTONS 1, 2 ET NIVEAU :

1. Déplacer le plateau de table (Trendelenburg, inclinaison, hauteur) jusqu'à la position souhaitée.
2. Une fois la position souhaitée atteinte, appuyer sur le bouton « S » pendant 5 secondes.
3. Relâcher le bouton « S », mais appuyer dans les 2 secondes qui suivent sur le bouton de la position programmable souhaitée (1, 2 ou NIVEAU). Si la configuration est réussie, un signal sonore retentit.



Les patients doivent être installés sur la table par le côté. Une inclinaison ou une instabilité peut survenir si le patient est installé à l'extrémité d'imagerie de la table.