

# 100UC+ – FICHE RAPIDE



**AVERTISSEMENT! Lire le mode d'emploi avant utilisation**



## AVERTISSEMENT!

Avant d'installer un patient sur la table, toujours placer les roulettes avant et arrière en position de « VERROUILLAGE ». Vérifier que la table est complètement immobilisée avant d'installer le patient. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves.

## MISE EN PLACE ET PRÉPARATION DU PATIENT :

Pour déplacer la table (JAMAIS AVEC UN PATIENT DESSUS) :

- 1) Déverrouiller les roulettes avant et arrière.
- 2) Placer la table à l'emplacement souhaité.
- 3) Sécuriser la table en verrouillant les roulettes avant et arrière.

Alimentation CA :

- 1) Brancher le câble d'alimentation dans la prise correctement mise à la terre.
- 2) Protéger le câble d'alimentation des roulettes et de tout autre équipement.

Commandes :

- 1) Lorsqu'il est engagé, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence désactive toutes les commandes de mouvement du plateau de table.
- 2) Vérifier que les commandes manuelles et à pédale sont connectées à la table.
- 3) Si les commandes de mouvement du plateau de table ne fonctionnent pas, vérifier que le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence n'est PAS enfoncé.
- 4) Actionner les commandes pour vérifier que l'alimentation électrique est présente et que le mouvement de la table fonctionne correctement.

## PROCÉDURES D'URGENCE :

Pour arrêter le mouvement du plateau de table :

- Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé.


Panne de l'alimentation CA :

- La batterie interne permet le fonctionnement des mouvements du plateau de table. Ramener le plateau de table en position adéquate afin de permettre le retrait sécuritaire du patient.



## RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR) :

Ramener la table à niveau, centrer le plateau pour minimiser le surplomb et abaisser la table à une hauteur confortable avant d'effectuer la RCR.

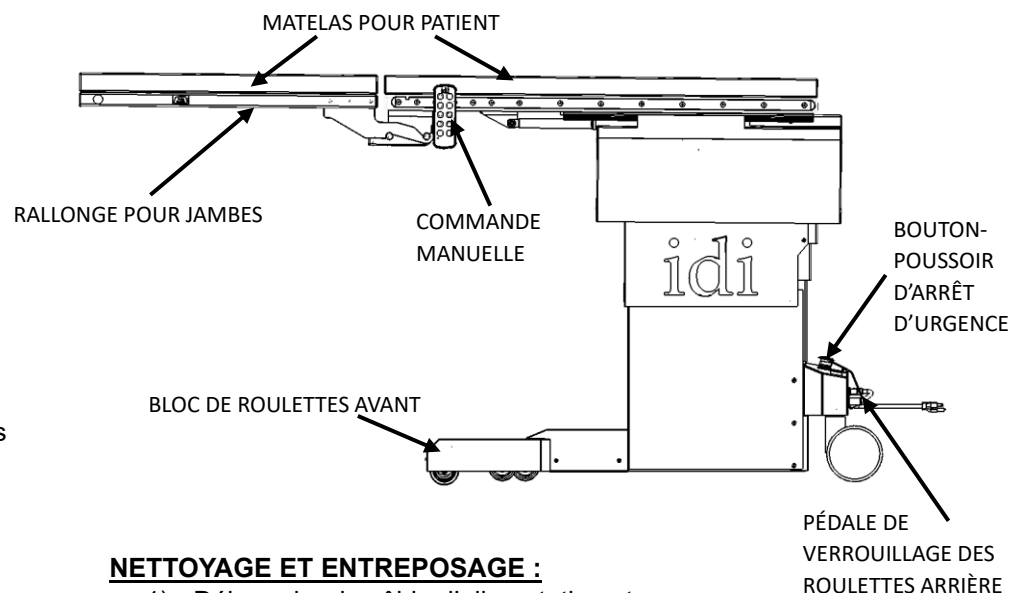

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE :

- 1) Débrancher le câble d'alimentation et l'enrouler autour du support de câble.
- 2) Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- 3) Mettre les roulettes en position de VERROUILLAGE.
- 4) Nettoyer et désinfecter la table.



Numériser pour accéder aux manuels d'utilisation en ligne

# 100UC+ – Fiche rapide

## COMMANDE MANUELLE

APPUYER ICI POUR MONTER LE PLATEAU DE TABLE

APPUYER ICI POUR ABAISSER LE PLATEAU DE TABLE

APPUYER ICI POUR METTRE EN POSITION DE TRENDLENBURG INVERSÉE, LA TÊTE EN HAUT

APPUYER ICI POUR METTRE EN POSITION DE TRENDLENBURG, LA TÊTE EN BAS

APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS L'AVANT

APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS L'ARRIÈRE

APPUYER ICI POUR DÉPLACER LA TABLE VERS LA GAUCHE

APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS LA DROITE

APPUYER ET MAINTENIR POUR DÉPLACER VERS LA POSITION ENREGISTRÉE DU PLATEAU DE TABLE. POUR ENREGISTRER LA POSITION, MAINTENIR EN MÊME TEMPS LE BOUTON DE VERROUILLAGE PENDANT CINQ SECONDES, PUIS APPUYER À NOUVEAU SUR CE BOUTON POUR RÉGLER

APPUYER ET MAINTENIR POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LE BLOC DE ROULETTES AVANT. LA TABLE ÉMETTRA UN BIP INTERMITTENT PENDANT LE PROCESSUS DE VERROUILLAGE ET CESSERA UNE FOIS CELUI-CI TERMINÉ. LE PLATEAU DE TABLE NE BOUGERA PAS SI LA TABLE N'EST PAS VERROUILLÉE

VERROUILLAGE AVANT  
Prise


1100-3733 Rev. A

APPLIQUER LE BLOQUAGE DES ROUES AVANT ET ARRIÈRE AVANT UTILISATION

3X 4X

QR CODE

## PÉDALE DE COMMANDE

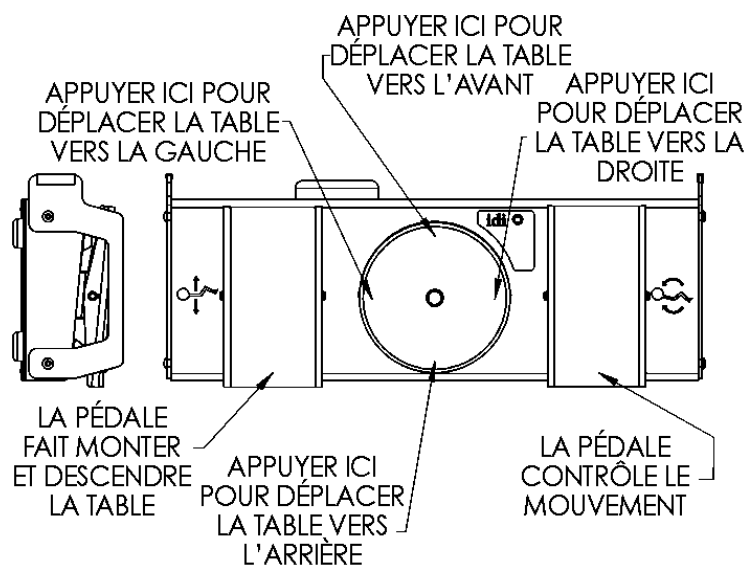

### BOUTON-POUSOIR D'ARRÊT D'URGENCE



- ENFONCER le bouton pour arrêter **TOUT** mouvement du plateau de table
- TOURNER pour réinitialiser

## CONSOMMABLES

- SACS DE DRAINAGE URINAIRE (BOÎTE DE 20)  
IDI N° C000-0593 (stériles)  
IDI N° C000-1111 (non stériles)
- HOUSSES JETABLES POUR PÉDALES DE COMMANDE (BOÎTE DE 50)  
IDI N° C000-0492
- HOUSSES JETABLES POUR MATELAS DE PLATEAU DE TABLE (BOÎTE DE 20)  
IDI N° C000-0645



Les patients doivent être installés sur la table par le côté. Une inclinaison ou une instabilité peut survenir si le patient est installé à l'extrémité du piédestal ou d'imagerie de la table.