


ATTENTION :



Image Diagnostics a récemment amélioré la conception de nos tables vasculaires mobiles en ajoutant une pédale de verrouillage de direction avant pour permettre de déplacer facilement la table dans toutes les directions. Lorsque les deux pédales sont engagées, la base de la table ne bouge dans aucune direction. Cela assure la stabilité latérale requise lors du chargement/déchargement du patient. Soulever la pédale avant et basculer la pédale arrière vers l'arrière déverrouillera et permettra le mouvement dans toutes les directions.

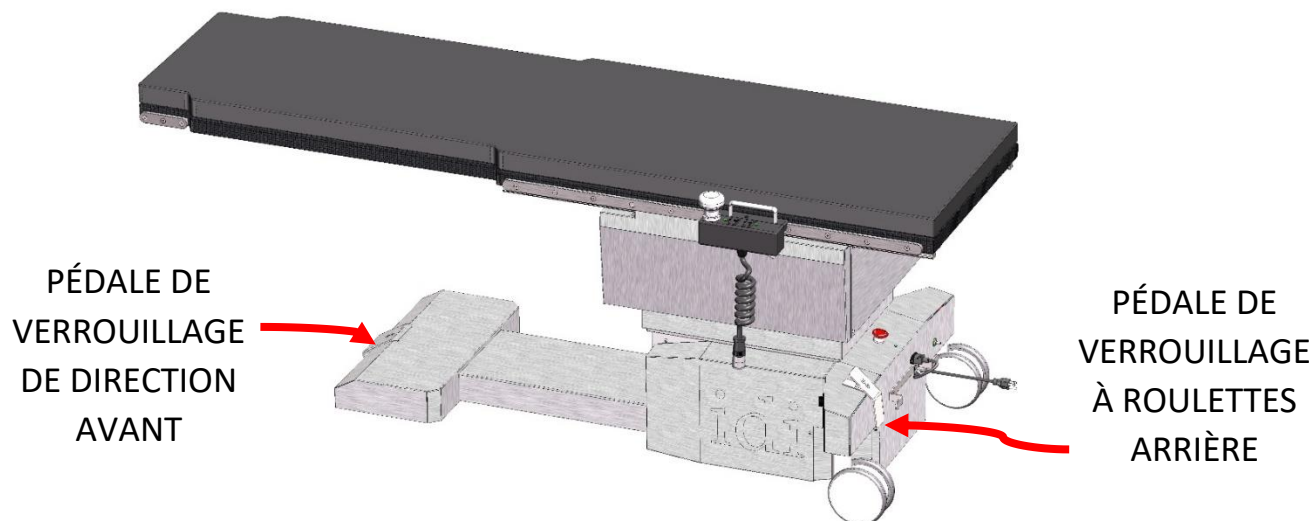

ATTENTION!

Avant de charger un patient sur la table, réglez toujours les pédales de mouvement du lanceur à l'avant ET à l'arrière à leur position « VERROUILLAGE ». Ne pas le faire pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

