

# 100UC+ FICHE RAPIDE



**AVERTISSEMENT! Lire le mode d'emploi avant utilisation**



**AVERTISSEMENT!**  
Avant d'installer un patient sur la table, toujours placer les roulettes avant et arrière en position de « VERROUILLAGE ». Vérifier que la table est complètement immobilisée avant d'installer le patient. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves.

## MISE EN PLACE ET PRÉPARATION DU PATIENT:

Pour déplacer la table (JAMAIS AVEC UN PATIENT DESSUS):


- 1) Déverrouiller les roulettes avant et arrière.
- 2) Placer la table à l'emplacement souhaité.
- 3) Sécuriser la table en verrouillant les roulettes avant et arrière.

Alimentation CA:

- 1) Brancher le câble d'alimentation dans la prise correctement mise à la terre.
- 2) Protéger le câble d'alimentation des roulettes et de tout autre équipement.

Commandes:

- 1) Lorsqu'il est engagé, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence désactive toutes les commandes de mouvement du plateau de table.
- 2) Vérifier que les commandes manuelles et à pédale sont connectées à la table.
- 3) Si les commandes de mouvement du plateau de table ne fonctionnent pas, vérifier que le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence n'est PAS enfoncé.
- 4) Actionner les commandes pour vérifier que l'alimentation électrique est présente et que le mouvement de la table fonctionne correctement.

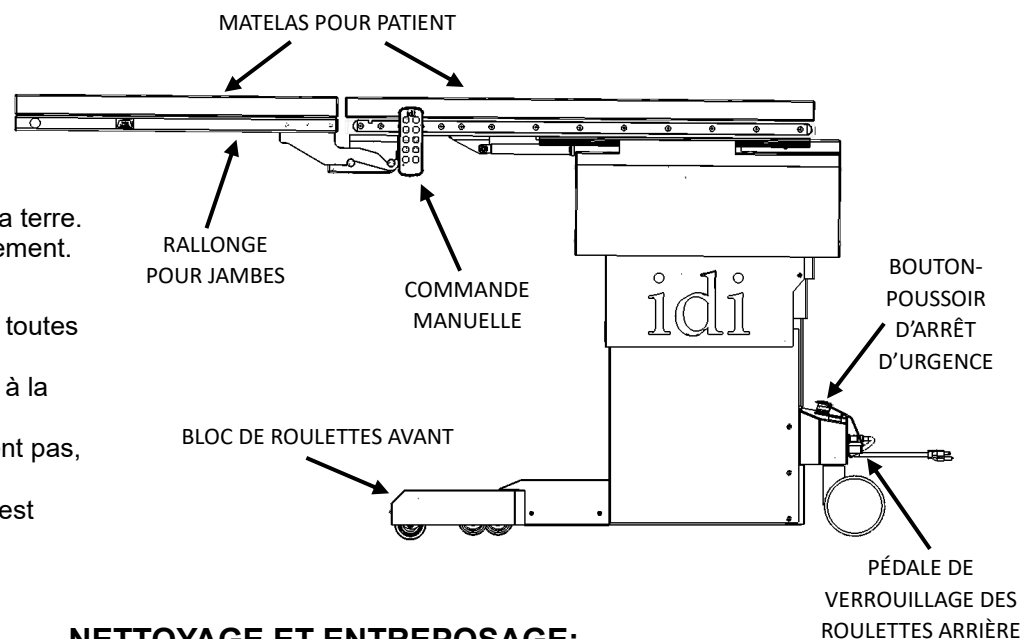

## PROCÉDURES D'URGENCE:

Pour arrêter le mouvement du plateau de table:

- Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé.

Panne de l'alimentation CA:

- La batterie interne permet le fonctionnement des mouvements du plateau de table. Ramener le plateau de table en position adéquate afin de permettre le retrait sécuritaire du patient.

## RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR):

Ramener la table à niveau, centrer le plateau pour minimiser le surplomb et abaisser la table à une hauteur confortable avant d'effectuer la RCR.



## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE:

- 1) Débrancher le câble d'alimentation et l'enrouler autour du support de câble.
- 2) Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- 3) Mettre les roulettes en position de VERROUILLAGE.
- 4) Nettoyer et désinfecter la table.



Numériser pour accéder aux manuels d'utilisation en ligne


# 100UC+ FICHE RAPIDE

## COMMANDE MANUELLE

**APPUYER ICI POUR MONTER LE PLATEAU DE TABLE**  
**APPUYER ICI POUR ABAISSER LE PLATEAU DE TABLE**  
**APPUYER ICI POUR METTRE EN POSITION DE TRENDLENBURG INVERSÉE, LA TÊTE EN HAUT**  
**APPUYER ICI POUR METTRE EN POSITION DE TRENDLENBURG, LA TÊTE EN BAS**  
**APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS L'AVANT**  
**APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS L'ARRIÈRE**  
**APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS LA GAUCHE**  
**APPUYER ICI POUR DÉPLACER LE PLATEAU DE TABLE VERS LA DROITE**  
**APPUYER ET MAINTENIR POUR DÉPLACER VERS LA POSITION ENREGISTRÉE DU PLATEAU DE TABLE. POUR ENREGISTRER LA POSITION, MAINTENIR EN MÊME TEMPS LE BOUTON DE VERROUILLAGE PENDANT CINQ SECONDES, PUIS APPUYER À NOUVEAU SUR CE BOUTON POUR RÉGLER**  
**APPUYER DEUX FOIS POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LE BLOC DE ROULETTES AVANT. LA TABLE ÉMETTRA UN BIP INTERMITTENT PENDANT LE PROCESSUS DE VERROUILLAGE ET CESSERA UNE FOIS CELUI-CI TERMINÉ. LE PLATEAU DE TABLE NE BOUGERA PAS SI LA TABLE N'EST PAS VERROUILLÉE**

FRONT LOCK PRESS 2X  
 APPLY FRONT & REAR WHEEL LOCK PRIOR TO USE  
 L100-3723 Rev. B

## PÉDALE DE COMMANDE

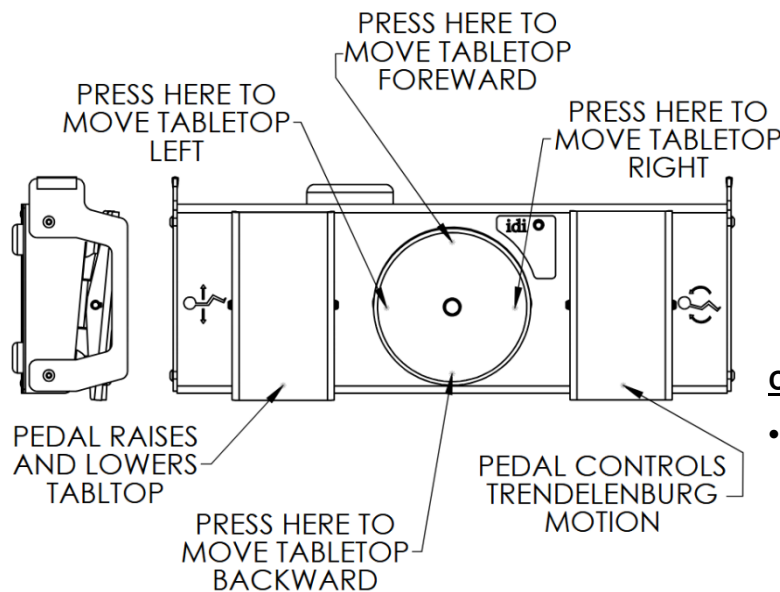

### BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE



- ENFONCER le bouton pour arrêter **TOUT** mouvement du plateau de table
- TOURNER pour réinitialiser

## CONSOMMABLES

- SACS DE DRAINAGE URINAIRE (BOÎTE DE 20)  
IDI N° C000-0593 (stériles)  
IDI N° C000-1111 (non stériles)
- HOUSSES JETABLES POUR PÉDALES DE COMMANDE (BOÎTE DE 50)  
IDI N° C000-0492
- HOUSSES JETABLES POUR MATELAS DE PLATEAU DE TABLE (BOÎTE DE 20)  
IDI N° C000-0645



Les patients doivent être installés sur la table par le côté. Une inclinaison ou une instabilité peut survenir si le patient est installé à l'extrémité du piédestal ou d'imagerie de la table.